

Piano di Sorveglianza e Controllo della COVID-2019

Igiene ambientale delle sale diagnostiche e trattamento delle apparecchiature radiologiche (revisione 1)

Queste indicazioni sono un approfondimento dei contenuti dell'allegato "Precauzioni da adottare per la gestione del caso sospetto / accertato di COVID-19 (revisione 1)", limitatamente alla pulizia e disinfezione delle sale diagnostiche e al trattamento delle apparecchiature radiologiche.

PRECAUZIONI STANDARD – DROPLET - CONTATTO	
<p>Preparazione della sala diagnostica</p>	<p>Alla comunicazione della necessità di eseguire l'indagine radiologica l'operatore sanitario (tecnico di radiologia, infermiere) deve preliminarmente preparare la sala come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sala diagnostica: <ol style="list-style-type: none"> 1. predisporre la postazione di vestizione degli operatori all'ingresso della sala diagnostica (dispositivi di protezione e gel alcolico) 2. verificare la presenza di salviette GIOCLOR WIPES o la soluzione di GIOCLOR al 10% (100 ml. di prodotto + 900 ml. di acqua); nel caso in cui si utilizzi il prodotto diluito prevedere anche i panni monouso 3. verificare la presenza del contenitore rigido per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e del carrello con il sacco rosso esterno e sacco idrosolubile interno per la raccolta della biancheria infetta ✓ inoltre per la diagnostica TAC: <ol style="list-style-type: none"> 1. stendere sul piano del lettino il foglio plastificato pretagliato e sopra collocare un lenzuolo in cotone (evita lo scivolamento dell'assistito sulla plastica) 2. se è necessario utilizzare il roller per la movimentazione dell'assistito, solo nel caso in cui questo abbia un rivestimento in tela, provvedere a proteggere anche questo con il foglio plastificato

PRECAUZIONI STANDARD – DROPLET - CONTATTO

Trattamento della apparecchiatura radiologica TAC



- ✓ A termine dell'esame radiologico, al trasferimento del caso, l'operatore sanitario deve rimuovere i dispositivi di protezione utilizzati per l'esecuzione dell'esame ed eseguire l'igiene delle mani seguendo le indicazioni presenti nell'allegato *“Indossare e rimuovere correttamente i dispositivi medici e di protezione individuale – rischio coronavirus”* e smaltirli nel contenitore dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
- ✓ L'operatore sanitario procede al trattamento dell'apparecchiatura diagnostica:
 1. indossare i dispositivi di protezione come indicato nell'allegato *“Indossare e rimuovere correttamente i dispositivi medici e di protezione individuale – rischio coronavirus”*
 2. rimuovere il lenzuolo arrotolandolo dalla parte che non ha avuto contatto con l'assistito e collocarlo nel carrello con il sacco rosso esterno e sacco idrosolubile interno per la raccolta della biancheria infetta
 3. rimuovere il telo plastificato arrotolandolo dalla parte che non ha avuto contatto con l'assistito ed eliminarlo nei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
 4. eseguire la disinfezione del piano e delle altre parti dell'apparecchiatura con **salviette GIOCLOR WIPES o la soluzione di GIOCLOR al 10% (100 ml. di prodotto + 900 ml. di acqua), per 5 minuti di contatto**. Nel caso si utilizzi la soluzione, sullo spruzzino applicare una etichetta con il nome del prodotto, la diluizione e data di preparazione perché la soluzione preparata è stabile e quindi utilizzabile per 24 ore; per l'utilizzo inumidire il panno monouso con la soluzione e passare sulla superficie (non spruzzare la soluzione direttamente sulla superficie)
 5. se è stato utilizzato il roller protetto dal foglio plastificato, rimuovere il telo plastificato arrotolandolo dalla parte che non ha avuto contatto con l'assistito ed eliminarlo nei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e trattare l'intera superficie con le **salviette GIOCLOR WIPES o la soluzione di GIOCLOR al 10% (come sopra)**
 6. eliminare le salviette monouso e/o i panni nel contenitore dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
 7. rimuovere i dispositivi di protezione ed eseguire l'igiene delle mani seguendo le indicazioni presenti nell'allegato *“Indossare e rimuovere correttamente i dispositivi medici e di protezione individuale – rischio coronavirus”* e smaltirli nel contenitore dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

PRECAUZIONI STANDARD – DROPLET - CONTATTO

Trattamento delle altre apparecchiature radiologiche (torace, ossea, ecc)

- ✓ A termine dell'esame radiologico, al trasferimento del caso, l'operatore sanitario deve rimuovere i dispositivi di protezione utilizzati per l'esecuzione dell'esame ed eseguire l'igiene delle mani seguendo le indicazioni presenti nell'allegato "*Indossare e rimuovere correttamente i dispositivi medici e di protezione individuale – rischio coronavirus*" e smaltirli nel contenitore dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
- ✓ l'operatore sanitario procede al trattamento dell'apparecchiatura diagnostica:
 1. indossare i dispositivi di protezione come indicato nell'allegato "*Indossare e rimuovere correttamente i dispositivi medici e di protezione individuale – rischio coronavirus*"
 2. eseguire la disinfezione del piano e delle altre parti dell'apparecchiatura con **salviette GIOCLOR WIPES o la soluzione di GIOCLOR al 10% (100 ml. di prodotto + 900 ml. di acqua), per 5 minuti di contatto**. Nel caso si utilizzi la soluzione, sullo spruzzino applicare una etichetta con il nome del prodotto, la diluizione e data di preparazione perché la soluzione preparata è stabile e quindi utilizzabile per 24 ore; per l'utilizzo inumidire il panno monouso con la soluzione e passare sulla superficie (non spruzzare la soluzione direttamente sulla superficie)
 3. eliminare le salviette monouso e/o i panni nel contenitore dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
 4. rimuovere i dispositivi di protezione ed eseguire l'igiene delle mani seguendo le indicazioni presenti nell'allegato "*Indossare e rimuovere correttamente i dispositivi medici e di protezione individuale – rischio coronavirus*" e smaltirli nel contenitore dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

PRECAUZIONI STANDARD – DROPLET - CONTATTO

Apparecchio RX torace portatile

Preparazione dell'apparecchiatura e della cassetta prima dell'esecuzione dell'esame all'assistito:

- ✓ coprire l'apparecchio con la copertura a sacchetto con elastico (utilizzata anche per le scopie in sala operatoria) e inserire la cassetta nella busta di plastica

A termine dell'esame radiologico, l'operatore sanitario deve:

- ✓ rimuovere il primo paio di guanti e indossarne un paio pulito
- ✓ rimuovere la copertura con l'elastico arrotolandola dalla parte che non ha avuto contatto con l'assistito e smaltirla nei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infetti
- ✓ eseguire la disinfezione del piano e delle altre parti dell'apparecchiatura con **salviette GIOCLOR WIPES o la soluzione di GIOCLOR al 10% (100 ml. di prodotto + 900 ml. di acqua), per 5 minuti di contatto**. Nel caso si utilizzi la soluzione, sullo spruzzino applicare una etichetta con il nome del prodotto, la diluizione e data di preparazione perché la soluzione preparata è stabile e quindi utilizzabile per 24 ore; per l'utilizzo inumidire il panno monouso con la soluzione e passare sulla superficie (non spruzzare la soluzione direttamente sulla superficie)
- ✓ eliminare le salviette monouso e/o i panni nel contenitore dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
- ✓ rimuovere i dispositivi di protezione ed eseguire l'igiene delle mani seguendo le indicazioni presenti nell'allegato "*Indossare e rimuovere correttamente i dispositivi medici e di protezione individuale – rischio coronavirus*" e collocarli nel contenitore dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Igiene ambientale



- ✓ Attivare l'**intervento del Servizio di pulizia**, specificando che trattasi di intervento in un locale dove ha soggiornato un caso sospetto / accertato di COVID-19 per consentire agli operatori l'uso dei dispositivi di protezione e l'applicazione di buone pratiche di pulizia e disinfezione per prevenire la trasmissione del virus.

Gli operatori del servizio di pulizia dovranno poi seguire quanto già indicato nell'allegato "Precauzioni da adottare per la gestione del caso sospetto / accertato di COVID-19 (revisione1)".